

# CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL RESPIRADOR EN ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA\*

	N95 de cara completa (FFR)	N95 quirúrgico de cara completa (FFR)	Purificador de aire forzado con máscara de ajuste holgado (PAPR)	Elastomérico
Cumple con OSHA 1910.134 (estándar sobre protección respiratoria)	X	X	X	X
Requiere evaluación del riesgo	X	X	X	X
Requiere capacitación en el uso correcto	X	X	X	X
Requiere prueba de ajuste	X	X		X
Se puede usar con campos estériles		X	? <sup>†</sup>	
Se puede usar en procedimientos de alto riesgo que generen aerosoles (podrían requerirse EPP adicionales)		X	X	X
Se puede usar con vello facial (que entre en contacto con la superficie de sellado)			X	
Diseñado para volver a usarse (se puede limpiar y mantener)			X	X
Se puede usar para medidas de precaución de transmisión aérea	X	X	X	X

\*Estas consideraciones se deben entender en términos de uso general. Manténgase informado a medida que se actualicen las directrices de salud pública

<sup>†</sup>No hay evidencia suficiente para respaldar su uso seguro.

Fuente: OSHA/NIOSH Hospital Respiratory Protection Program Toolkit



Centers for Disease Control and Prevention  
National Institute for Occupational Safety and Health